



Autoryzowany przedstawiciel i dystrybutor
Alpha Diagnostics Sp. z o.o.
Ul. Gabriela 2, 01-347 Warszawa
Tel. (22) 631 40 13; fax (22) 632 42 11

Magazyn; Produkcja; Kontrola Jakości; Serwis
Ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
Tel. (22) 631 42 27; fax (22) 631 48 23
e-mail: ad@alphadiag.com.pl
www.alphadiag.com.pl

GIARDIA KONTROLA POZYTYWNA

Rodzaj opakowania	:	Odczynnik płynny
Główne założenia:	:	Celem wykonywania testu kontrolnego jest upewnienie się o obecności na pasku – nie specyficzności – przeciwciał przeciwko Giardia . Po zanurzeniu paska w kontroli rozcieńczonej buforem z zestawu do oznaczania Giardia, poprzez pasywną dyfuzję, dochodzi do migracji roztworu. Odczynnik zawarty w kontrolce najpierw łączy się z konjugatem przeciwciał a następnie z przeciwciałami opłaszczającymi linię testową. Powoduje to powstanie kolorowej linii w specyficznej dla Giardia strefie testowej.
Sposób użycia	:	W celu uzyskania pozytywnej reakcji, przed użyciem rozcieńczyć buforem Giardia 1/1 (v/v).
Przechowywanie	:	W formie nierozcieńczonej i w temp.4°C trwałość wynosi kilka miesięcy (data ważności podana na opakowaniu). Po rozcieńczeniu i zamrożeniu w temp. -20°C można przechowywać kilka miesięcy. Nie zamrażać wielokrotnie.
Ostrzeżenia	:	Odczynnik nie zawiera składników zakaźnych, ale jako konserwanta użyto azydek sodu (<0.1%) Obchodzić się ostrożnie.
Numer katalogowy	:	C-1093

Wydanie: kwiecień 2005r.
Aktualizacja: 14.02.2008r.